

## 24 PASTILLES SOLUBLES

**ATTENTION : NE PAS MANGER, TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**

**Remarque : Utiliser une solution fraîche à chaque fois que vous nettoyez votre POWERbreathe.**

**Éviter tout contact avec les tissus car la solution peut entraîner une décoloration.**

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

**Remarque : Pour de plus amples instructions, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur du produit à nettoyer.**

**Le socle du système POWERbreathe série K ne doit pas être immergé.**

Il est inutile de démonter le POWERbreathe Classic / Plus.

1. Nettoyer la tête de respirateur de votre POWERbreathe Classic/Plus ou POWERbreathe Série K dans l'eau chaude, afin de vous assurer que toute la salive soit enlevée.
2. Préparer la solution nettoyante dans un container non métallique. Mettre une pastille dans 2 litres d'eau tiède ou froide.
3. Immerger intégralement votre POWERbreathe Classic/Plus ou la **tête de respirateur POWERbreathe Série K** dans la solution, en vous assurant qu'il ne reste aucune bulle à l'intérieur.
4. Laisser les pièces immergées dans la solution pendant au moins 30 minutes.
5. Faire partir l'eau des pièces et les rincer à fond sous le robinet.
6. Faire partir l'excès d'eau en secouant, et laisser sécher sur une serviette propre.
7. Laver vos mains à fond suite à tout contact avec la solution.



### Avertissement

Peut irriter gravement les yeux  
Peut irriter les voies respiratoires  
Très nocif pour les espèces marines en raison de longs effets.  
Tout contact avec des acides provoque un dégagement de gaz toxiques.  
Avertissement ! Ne pas utiliser en même temps que d'autres produits.  
Susceptible de dégager des gaz dangereux (chlore).  
En cas de besoins de conseils médicaux, emmenez avec vous le container du produit ou l'étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Lire l'étiquette avant utilisation.  
À n'utiliser qu'en plein air ou dans des endroits très aérés.

Éviter toute pollution de l'environnement.  
EN CAS D'ÉCOULEMENT DU PRODUIT DANS LES YEUX : Rincer à l'eau avec précaution pendant plusieurs minutes.  
Retirer les verres de contact le cas échéant et s'il est facile de le faire. Continuer de rincer.  
Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.  
Ranger dans un endroit sec.  
Ranger enfermé.  
Éliminer le contenu / container conformément à la législation locale.  
Pastilles de chlore.  
Contient du dichloroisocyanurate de sodium anhydre.  
Attention : La solution peut décolorer tout tissu.

**INGRÉDIENTS: Dichloroisocyanurate de sodium (400 mg par pastille), acide adipique, bicarbonate de sodium.**

